

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Profilowana i ergonomiczna poduszka ALOVA®

PORADY:

Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u siedzącego lub leżącego pacjenta jest zmiana punktów podparcia ciała na materacu średnio co 3 godziny, aby ograniczyć zbyt długie ściskanie naczyń przez wystające elementy kostne i umożliwić ukrwienie tkanek.

WSKAZANIA:

Poduszka profilaktyczna dla pacjentów z ryzykiem powstania odleżyn od średniej do wysokiej skali (według oceny klinicznej skali), bez niesymetrycznego podparcia i bez ryzyka zsunienia się do przodu.

PRZECIWSKAZANIA:

- Odleżyny na wysokości kości krzyżowo-ogonowej i/lub kulszowej.
- Niesymetryczne podparcie.

INSTALACJA:

- Jeżeli wyrób był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, zalecamy umieścić go przed użyciem na 30 minut w cieplejszym pomieszczeniu ($T^{\circ} > 15^{\circ}\text{C}$) po wyjęciu z opakowania.
- Umieścić zagłębienia na kość kulszową i wycięcie kości ogonowej z tyłu, a rotator zewnętrzny z przodu.
- Zabezpieczyć poduszkę, używając dostarczonej osłony, pilnując, aby etykieta z oznaczeniem „tył/back” znajdowała się z tyłu poduszki. (Gama CAG) W każdym wypadku poduszka powinna być ułożona stroną antypoślizgową do fotela. Uchwyt (pod wyrobem) powinien być skierowany do przodu poduszki.
- W przypadku poduszki ze stabilizatorem miednicy upewnić się, że znajduje się on na poziomie zewnętrznego rotatora i jest skierowany do przodu. Należy włożyć stabilizator miednicy do kieszeni w pokrowcu przed jego założeniem na poduszkę.
- Zgodnie z dekretem 2006-1637 z dn. 19.12.2006 r: „Usługodawcy i dystrybutorzy sprzętu ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe użycie produktu podczas instalacji” (fragment).

CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA • Pokrowiec Promust PU:

Zalecana częstotliwość czyszczenia: tak często jak to jest konieczne ze względów higienicznych.



BEZPIECZEŃSTWO:

- Sprawdzić, czy wybrana poduszka jest dostosowana do wagi pacjenta i wymiarów siedziska fotela:

Waga min. – maks. użytkownika (kg)	Nr referencyjne	Nazewnictwo
30-100	VCAE/M4343	Poduszka ALOVA ergonomiczna standardowa
20-80	VCAG3636	Poduszka ALOVA profilowana standardowa < 38 cm
30-90	VCAG3841 (BP), VCAG4041 (BP) VCAG4043, VCAG4340	Poduszka ALOVA profilowana standardowa (bez BP i bez XL) Poduszka ALOVA profilowana techniczna (z BP lub z XL)
30-100	VCAG4341 (BP), VCAG4343 (BP)	
30-110	VCAG4343XL	
30-120	VCAG4544 (BP), VCAG4347 (BP), VCAG4540	
30-135	VCAG5044BP, VCAG5044XL VCAG5044	
120-160	VCAG5250, VCAG5450	Poduszka ALOVA profilowana standardowa > 45 cm
120-200	VCAG5650, VCAG6050	

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z POKROWCAMI:

- Chronić poduszkę, używając dostarczonych pokrowców, które muszą pozostawać suche.
- Nie używać produktów ściernych, czyszczących ani rozpuszczalników oraz przedmiotów ostrych i tnących w bezpośrednim kontakcie z pokrowcem.
- Kontrolować regularnie normalne zużycie osłon i wymieniać je w przypadku uszkodzenia (dziura, pęknięcie, zmiana wyglądu powierzchni, przetarcia widoczne pod światło).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI:

- Chronić piankę przed długotrwałą wilgocią.
- Regularnie sprawdzać wzrokowo stan pianki: widoczne zapadnięcia materiału ALOVA lub niejednakowy i bardzo powolny powrót po nacisku stanowią kryteria starzenia się, wpływającego na wkład podkładu w profilaktykę przeciwoleżynową.

PRZECHOWYWANIE: Poduszki ALOVA powinny być przechowywane na płasko oraz zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i nadmierną wilgocią.

USUWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH:

- Nie palić i nie wyrzucać poduszki i pokrowca poza wyznaczonymi miejscami.

GWARANCJA

Gwarancja poduszki ALOVA wynosi 3 lata. Obowiązuje ona od daty zakupu u dystrybutora.

W przypadku użycia przez jednego pacjenta, gwarancja obejmuje poduszkę i pokrowiec. W przypadku użycia przez wielu pacjentów zalecamy wymianę pokrowców co 2 lata.

Zalecamy użycie pokrowca Dermalon tylko dla jednego pacjenta. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu i jego pokrowca.

Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i przekazać mu uszkodzony produkt. Sprzedawca podejmie niezbędne kroki wobec naszej firmy w celu naprawy lub standardowej wymiany.

OKRES PRZYDATNOŚCI

- Szacowana żywotność poduszek z pianki wiskoelastycznej wynosi 4 lata.

SKŁAD PODUSZKI:

- Poduszka wykonana jest w 100% z odlewanej pianki poliuretanowej wiskoelastycznej.