

# Dørgennemføring

Nem og hurtig forflytning gennem døre



Billedet viser dørkobling ved to rundækkende loftlift systemer. Se bagsiden for flere oplysninger. Dørkobling kan også anvendes til fastmonterede skinner.

## Primær anvendelse

Pleje i hjemmet  
Plejehjem  
Hospitaler  
Institutioner

Dørgennemføring benyttes til forflytning fra rum til rum. Denne unikke Ergolet dørgennemføring giver borger og plejer et **færre antal forflytninger** og bruges ofte fra soverum til bad- og toilet.

Med denne Ergolet løsning skabes et bedre arbejdsmiljø, for plejeren og **mindsker risikoen for fysiske skader**.

Ergolet dørgennemføring monteres som en vægløsning, der **syner diskret i rummet**, og derfor er en foretrukket løsning blandt arkitekter og bygherre. Dørgennemføringen **passer til de fleste vægtykkelser** og gør den **unik**, fordi den kommer tæt ind mod væggen, og dermed udnytter rummet **optimalt**.

Ergolet dørgennemføring har en **bredde på kun 300 mm** og kræver ikke kostbare ændringer af husets elektriske system, da det betjenes manuelt: åbning af forbindelsen sker ganske enkelt ved, at man trækker i betjeningsnoren. For at låse skal man trække i snoren igen og låsemekanismen klikker traversen på plads.

## Vigtigste standardfunktioner

Kompakt og diskret  
Bredde på kun 300 mm  
Flexibel til faste systemer og til traverssystemer  
Manuel betjening





1. Træk i snor for at aktivere dørkobling. Kør traversen imod dørkobling.



2. Når traversen er placeret ud foran dørkobling, lyder et lille **klik**, som låser traversen.




3. Når loftliften er kørt gennem dørkobling, låses traversen op ved et træk i snor.



Travers skinne 135 mm  
Koblingsstykke 135 mm  
Travers skinne 135 mm



Fastmonteret skinne 135 mm  
Travers skinne 135 mm

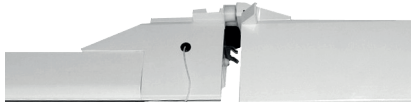

Fastmonteret skinne 75 mm  
Travers skinne 135 mm

## PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Manuel betjening – kræver ikke kostbare ændringer af husets elektriske system
- Travers låser på plads ved et enkelt træk i betjeningssnoeren
- Kompakt og diskret
- Flere modeller, der passer til individuelle behov

Version	HMI-nr.	Varenr.
Travers skinne 135 mm - Koblingsstykke 135 mm - Travers skinne 135 mm		016-01080
Fastmonteret skinne 135 mm - Travers skinne 135 mm		016-01081
Fastmonteret skinne 75 mm - Travers skinne 135 mm		016-01073



Åbning af forbindelsen sker ganske enkelt ved, at man trækker i **betjeningssnoeren**.  
For at låse skal man trække i **snoeren igen**.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Koblingsstykke 135mm	Fastmonteret skinne 75mm
Længde	300 mm	220 mm
Højde	145 mm	145 mm
Bredde	100 mm	100 mm

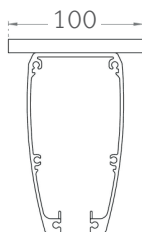


Illustration af koblingsstykke 135 mm


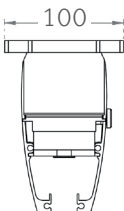


Illustration af fastmonteret skinne 75 mm



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

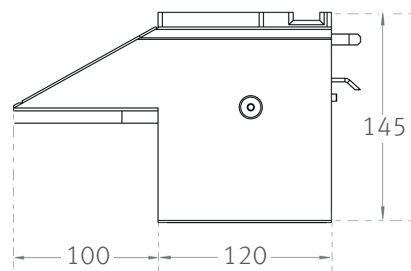

date 02.04.2014 - ver. 2

Ergolet  
Tårnborgvej 12C  
4220 Korsør  
Danmark  
tlf. +45 70 27 37 20  
e-mail: ergolet@ergolet.dk

[www.ergolet.com](http://www.ergolet.com)

