


ELEKTRISK **DREJESKIVE** FIRVEJS-FORFLYTNING I ÉT SYSTEM - AKTIVERES AUTOMATISK AF LUNA

Winncares nye elektriske drejeskive er den ideelle løsning til at skifte retning, når to skinner krydser hinanden.

Drejeskiven aktiveres automatisk af Luna loft-lift, uden behov for separat strømtilførsel.

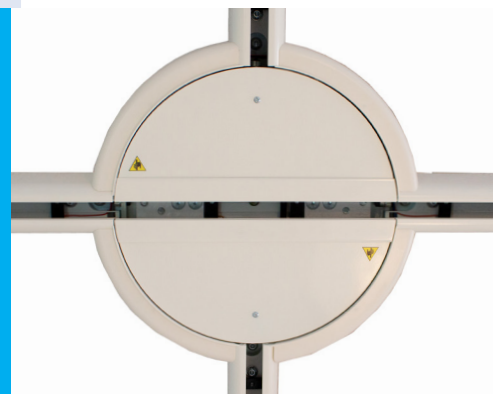

Berøringsfrit system

Det automatiske system er simpelt og smart; Du skal blot føre Luna ind i midten af drejeskiven, som efter to sekunder aktiveres og begynder at dreje.

Det automatiske og berøringsfrie system giver plejen mulighed for at holde fokus på brugeren og dennes velbefindende under forflytning.

Gnidningsfri og intuitiv

Drejeskiven drejer gnidningsfrit og støjsvagt.

Fire LED-lys indikerer drejeskivens aktivitetsstatus; Når Luna placeres i midten af drejeskiven, skifter LED-lysene fra grøn til rød, hvilket indikerer, at systemet drejer.

Klik på billedet herover for at se en demonstration af den elektriske drejeskive.

Nem at integrere

Den elektriske drejeskive er kompatibel med Luna 200 eller 275 kg, monteret på en bajonet-kørevogn med strømoverførsel.

Drejeskiven kan nemt monteres og implementeres i alle enkeltsporede Winncare skinner og med den rette konfiguration af skinner, kan den også anvendes i forbindelse med XY-systemer.

Drejeskiven fås i to varianter; Én til en enkelt Luna-enhed og én til flere enheder.