



QR-kode nach Informationen durchsuchen

Walking-Gurte



Bedienungsanleitung

Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Walking-Gurt in Gebrauch nehmen.

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an Ergotherapeuten und andere Fachkräfte, im Zusammenhang mit der Benutzung und Instandhaltung des ErgoSling.

Dato: 10.08.2021

Version 05

Inhalt

1. ZWECK UND ANWENDUNG	3
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN	3
3. VOR GEBRAUCH KONTROLLIEREN	4
4. BENUTZUNG	5
5. GEHWALKING-GURT	7
5.1 Anwendung.....	7
5.2 Technische Angaben.....	7
6. PFLEGE	8
6.1 Reinigung	8
6.2 Lagerung	8
7. INSPEKTION.....	8
8. UMWELT UND QUALITÄT	8
8.1 Entsorgung.....	8
8.2 Qualität	9
8.3 Symbole	9

1. ZWECK UND ANWENDUNG

Die Walking-Gurte von ErgoSlings sind Walking-Walking-Gurte, die den Zweck haben, Benutzern mit verminderter Gehfunktion beim Reha-Training der Steh- und Gehfunktion zu helfen.

- Der Walking-Gurt kann von Pflegediensten, in Einrichtungen und in Privathaushalten verwendet werden.
- Der Walking-Gurt kann in einer Reha-Situation verwendet werden, z. B. in einem stationären Personenlifter oder mit Winnicare Nordics eigenem ErgoTrainer.
- Der Walking-Gurt ist in mehreren Größen erhältlich. Siehe Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis: ErgoSlings darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN



Wichtig – Achtung!

Lesen Sie diese Anleitung und diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Walking-Gurt in Gebrauch nehmen:

- Die maximale Hebekapazität des Walking-Gurts darf nicht überschritten werden. Siehe technische Angaben und Etikett am Walking-Gurt.
- Der Walking-Gurt muss die korrekte Größe haben.
- Überprüfen Sie den Walking-Gurt auf sichtbare Beschädigung und Verschleiß. Überprüfen Sie besonders, ob die Nähte intakt sind. Die Hebeschlaufen dürfen nicht ausgefranst sein, und es darf keine Knoten in der Schlaufe geben.
- Der Walking-Gurt muss aus Hygienegründen sauber sein. Siehe Waschanweisung in Kapitel 5.
- Niemals den Benutzer im Walking-Gurt zurücklassen. Der Walking-Gurt darf nur in Anwesenheit von qualifiziertem Personal angelegt und benutzt werden.
- Wird der Walking-Gurt zusammen mit anderen Komponenten benutzt, ist darauf zu achten, dass es nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Zum Beispiel, wenn sich der Walking-Gurt in den Rädern des Rollstuhls oder ähnlichem verfängt.
- Es ist sicherzustellen, dass weder Helfer/Pfleger noch der Benutzer während der Benutzung zu Schaden kommen können. Siehe Kapitel - 3. Vor Gebrauch kontrollieren.
- Der Helfer ist für die korrekte Verwendung des Walking-Gurtes und die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen verantwortlich.

3. VOR GEBRAUCH KONTROLLIEREN


Der Helfer ist dafür verantwortlich, dass der Walking-Gurt vor der Benutzung geprüft wird. Er muss in die Benutzung eingewiesen worden sein.

Kontrollieren Sie vor Gebrauch folgende Punkte:

- 1) Kontrollieren, dass der Walking-Gurt die richtige Größe hat, sodass er dem Benutzer passt.

Hinweis: Der Walking-Gurt ist auf dem Rücken mit einem Farbcode gekennzeichnet, der über die Walking-Gurtgröße Aufschluss gibt.

XXS	XS	S	M	L	XL
62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm
Orange	Weiß	Rot	Gelb	Grün	Blau

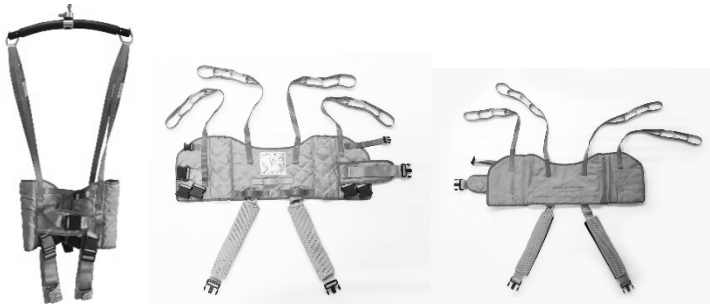


- 2) Kontrollieren, ob Schlaufen, Schnallen und Walking-Gurtstoff intakt sind.
- 3) Kontrollieren, dass der Walking-Gurt sauber ist.
- 4) Bei Unklarheiten in Bezug auf die Bedienung können Sie sich für Rat und Hilfe an WinnCare Nordic wenden.


4. BENUTZUNG

Ingebrauchnahme

- Immer zuerst die oberste Schlaufe (Brustschlaufe) schließen und entsprechend der Größe des Benutzers anpassen (Thorax).
- Beinschlaufe entsprechend in einem der zwei Verschlüsse platzieren.
- Der Walking-Gurt hat elastische Seiten, die sich an den Benutzer anpassen.
- Hebeschlaufen am Haken des Bügels anbringen.
- Extra-Schlaufen vorne und hinten am gehWalking-Gurt für die Benutzung von Trainingsgeräten elastischen.
- Als zusätzliche Sicherheit stellen Sie die Anpassungsschnallen (unten markiert) hinter der männlichen Schnalle nach.

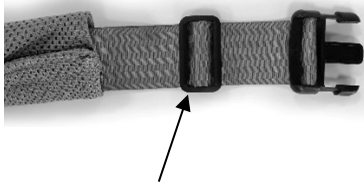

Anpassungsschnalle zur Einstellung

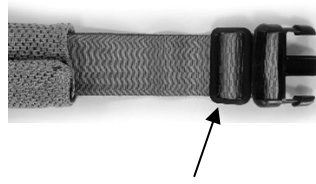

Anpassungsschnalle korrekt eingestellt

Geh-/Lauftraining auf Laufband



Balancetraining auf dem Fußboden



Treppensteigen üben




Aufhängen des Walking-Gurt am Hebebügel



WinnCare Nordic lehnt jede Verantwortung ab, wenn das Walking-Gurt nicht oder ordnungsgemäß eingerastet ist.

Der Helfer hat stets die Verantwortung dafür, dass ein korrekter Walking-Gurt benutzt wird, der zum Bedarf/Zweck passt.

- 1) Walking-Gurtschleife am offenen Haken einhängen.
- 2) Die Schleife wird heruntergezogen und der Haken automatisch geschlossen.
- 3) Um die Schleife auszuhängen, Schleife anheben, sodass sich der Haken öffnet.

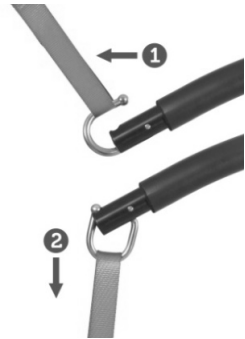


Hinweis: Der Haken ist so konstruiert, dass das Gewicht des Benutzers ihn automatisch geschlossen hält.



Achten Sie darauf, dass die Finger des Benutzers/Helfers nicht am Haken eingeklemmt werden.

5. GEHWALKING-GURT

5.1 Anwendung

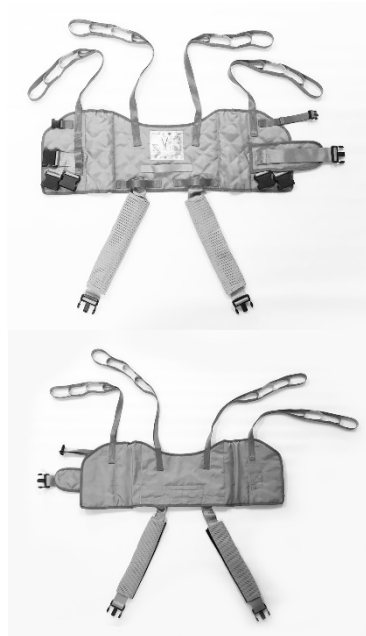

Hinweis: Der Walking-Gurt darf nur für Reha-Zwecke und nicht für normales Heben benutzt werden.

5.2 Technische Angaben

SWL	180 kg
Material	Polyester
Gepolstert	Ja
Passt zu folgenden Bügeln	2-punkt
Walking-Gurt in folgenden Größen erhältlich	XXS - XL

6. PFLEGE

6.1 Reinigung

Der Walking-Gurt ist maschinenwaschbar. Es wird empfohlen, die Schnallen zu schließen und den Walking-Gurt in einem Wäschenetz zu waschen, um die Schnallen zu schonen.

Hinweis: Benutzen Sie keinen Weichspüler oder Waschmittel mit Bleichmittel.

Der Walking-Gurt kann bei niedriger Temperatur in einem Trommel Trockner getrocknet werden.

Folgen Sie den Anweisungen der Symbole auf dem Waschetikett.

Eine Erläuterung der Symbole finden Sie unter Kapitel 7.3 - Symbole und Abkürzungen.

6.2 Lagerung

Wenn der Walking-Gurt nicht in Gebrauch ist, sollte er in der Originalverpackung in einer trockenen und sauberen Umgebung bei einer Temperatur von 0-40°C aufbewahrt werden.

7. INSPEKTION

ErgoSlings muss mindestens einmal halbjährlich durch qualifiziertes Fachpersonal überprüft werden.

Der rechtliche Eigentümer des Produkts ist dafür verantwortlich, dass diese Überprüfung durchgeführt wird.

Ein Inspektionsschema ist auf Anfrage bei WinnCare Nordic erhältlich.

Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler ist zwei Jahre Garantie, sofern die Sicherheits- und Pflegehinweise beachtet wurden.

8. UMWELT UND QUALITÄT

ErgoSlings hat eine veranschlagte Lebensdauer von mindestens 5 - 10 Jahren bei normaler täglicher Benutzung, unter der Voraussetzung, dass die empfohlene Überprüfung durchgeführt wurde und die Pflegeanweisungen beachtet wurden.

8.1 Entsorgung

ErgoSlings kann als brennbares Material bei einer Recycling-Annahmestelle oder bei WinnCare Nordic abgegeben werden.

8.2 Qualität

WinnCare Nordic ist nach Qualitätsstandard ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert.

Diese Zertifizierungen bedeuten, dass Produkt und Unternehmen die geltenden internationalen Standards für Qualitätsmanagement und die Standards für die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten erfüllen.

ErgoSlings wird als Medizinprodukt Klasse 1 klassifiziert.

8.3 Symbole



Normal maschinenwaschbar unter Beachtung der angegebenen Temperatur.



Nicht bügeln



Bleichen nicht erlaubt.



Nicht chemisch reinigen.



Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur.



Siehe Bedienungsanleitung



Kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden

SWL

Safe Working Load (zulässige Belastung) = (Benutzer + Zubehör)



Produkt ist CE-gekennzeichnet.

Hersteller:

WinnCare Nordic ApS
Tårnborgevej 12 C
4220 Korsør
Danmark

Phone: + 45 70 27 37 20
Fax: + 45 70 27 37 19
Email: info@WinnCare.dk
www.WinnCare.dk

93/42/EØF CLASS I

DS/EN 12182



910-00770DE