

# I DISPOSITIVI D'AIUTO TECNICO ALLA POSTURA IN POSIZIONE ALLUNGATA

**NOVITÀ**  
Fodere saldate  
**C.I.C.**  
**Total Protection Ag++**

«\* Assenza di penetrazione di liquido e di sviluppo di microorganismi»



Cuscini di posizionamento composti da microsfere di polistirene di bassa granulometria, mantenute in un involucro impermeabile e traspirante costituito da una fodera saldata CIC.

## Prevenzione delle piaghe da decubito a livello del trocantere, dell'osso sacro e dei talloni

Gli esperti raccomandano la posizione in decubito laterale obliquo 30°.  
LA SOLUZIONE **ASKLÉ SANTÉ**



- 2 taglie per un adattamento ottimale rispetto alla morfologia dei pazienti
- Un guanciale integrato per il comfort dell'utilizzatore
- Un'installazione facile, senza sforzo e rapida del paziente
- Un mantenimento stabile e duraturo

## Prevenzione delle piaghe da decubito a livello dei gomiti e dei talloni

Gli esperti raccomandano il totale scarico dei gomiti e dei talloni in decubito dorsale.

LA SOLUZIONE **ASKLÉ SANTÉ**



- Un'inclinazione moderata che preserva la circolazione sanguigna
- Un'architettura non traumatica
- Una forma malleabile

## Prevenzione delle piaghe da decubito a livello dell'osso sacro, degli ischi e dei talloni

Gli esperti raccomandano una posizione semi-seduta (posizione di Fowler) per ridurre la pressione esercitata sugli ischi e sui talloni, e ridurre le lesioni della pelle a livello sacrale.

LA SOLUZIONE **ASKLÉ SANTÉ**



- La riduzione della tendenza del corpo a scivolare in avanti
- Un mantenimento laterale del tronco
- Un'alternativa ai letti con reti non articolate

## Prevenzione delle piaghe da decubito a livello dei malleoli e delle ginocchia

Gli esperti raccomandano l'abduzione degli arti inferiori per ridurre la pressione a livello dei malleoli e delle ginocchia.

LA SOLUZIONE **ASKLÉ SANTÉ**



- Il mantenimento degli arti inferiori in abduzione
- La riduzione dei punti di contatto tra le ginocchia

## GUIDA DELLA MOBILIZZAZIONE ALTERNATA

8h	TOELETTA - PRIMA COLAZIONE
9h	
10h	VISITE ED ATTI MEDICI E PARAMEDICI
11h	
12h	PRANZO
13h	
14h	SIESTA - VISITA
15h	
16h	MERENDINA VISITE ED ATTI MEDICI E PARAMEDICI
17h	
18h	CENA
19h	
20h	ATTI PARAMEDICI
21h	
22h	
23h	CURE INFERMIERE AIUTO-INFERMIERE
24h	
1h	
2h	CURE INFERMIERE AIUTO-INFERMIERE
3h	
4h	
5h	CURE INFERMIERE AIUTO-INFERMIERE
6h	
7h	



Accessori di posizionamento costituiti da materia viscoelastica ALOVA protetta da un involucro impermeabile e trasparente che funge da barriera ai microorganismi.

## > GLI SCARICHI DEI TALLONI ALOVA



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- Scarico totale della zona dei talloni



### INDICAZIONI

- Piaghe da decubito già costituite dei talloni
- Perdita di mobilità degli arti inferiori senza rischio d'equinismo
- Uso per più pazienti



## > TALLONIERA DI SOLLEVAMENTO DEI PIEDI CON SCARICO DEI TALLONI



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- Stabilizzazione delle caviglie in flessione plantare
- Scarico dell'appoggio dei talloni

### INDICAZIONI

- Riduzione e scarico delle zone di appoggio
- Prevenzione delle piaghe da decubito dei talloni o ausilio per il trattamento delle piaghe da decubito già costituite dei talloni
- Uso per più pazienti

## > DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO CONTRO LE PIAGHE DA DECUBITO




### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- Mantenimento stabile e duraturo di una persona allungata in posizione laterale obliqua a 30°

### INDICAZIONI

- Prevenzione delle piaghe da decubito sacrali
- Piaghe da decubito sacrali costituite di stadio 1 - 2
- Uso per più pazienti

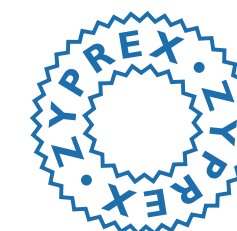

Accessori di posizionamento costituiti da materia Zyprex o da Gel fluido.



## MINI TALLONIERA

## TALLONIERA GEL FLUIDO

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- Scarico della zona dei talloni
- Riduzione della pressione d'appoggio

### INDICAZIONI

- Prevenzione delle piaghe da decubito dei talloni
- Piaghe da decubito costituite dei talloni
- Uso per singolo paziente




WINCARE  
g r o u p

by

ASKLÉSANTÉ

Si raccomanda di eseguire cambi di posizione ogni 2 - 3 ore tenendo conto del paziente, delle sue esigenze e delle sue abitudini - Prevenzione delle piaghe da decubito degli adulti e degli anziani. Dic. 2001 Haute Autorité de Santé.  
La frequenza di riposizionamento può essere influenzata dal tipo di supporto usato. Questa ultima potrà essere ridotta con una superficie in schiuma viscoelastica. International Guideline EPUAP, 7 gennaio 2010.

ASKLÉSANTÉ 200 rue Charles Tellier - ZI de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 Francia - Telefono: +33 (0)466 02 15 15 Fax: +33 (0)466 02 15 28 Email: contact@askle.com www.winnicare.fr

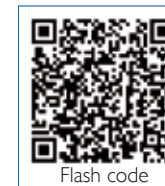

Flash code